



Gebrauchs- und Pflegeanleitung Hilfsmittel aus Silikon

Sie haben heute Ihr Hilfsmittel aus Silikon erhalten. Das Qualitätssiegel „Silicon made by ORTHOVITAL“ steht für handgefertigte Maßarbeit und mehr als 20 Jahre Erfahrung. Damit Sie lange Freude und Nutzen an Ihrem Hilfsmittel haben, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:

Anziehen

Achten Sie auf die korrekte Positionierung, um Hautfalten zu vermeiden.

Materialeigenschaften

- biokompatibel (geruchs-, geschmacksneutral)
- feuchtigkeitsresistent und wasserbeständig
- UV- und alterungsbeständig
- Einsatztemperatur: – 50 bis + 177 °C

Vermeiden Sie Kontakt mit

- Lösungsmitteln (z. B. Verdünner, Aceton, Isopropylalkohol)
- Kraftstoffen (Benzin, Diesel)
- mineralischen Ölen
- mechanischen Einwirkungen (scharfe Gegenstände, Kanten, Spitzen)

Empfohlene Reinigung und Pflege

Reinigen Sie täglich das Hilfsmittel mit klarem Wasser und unserem speziellen Silikonreiniger (Derma Clean).

Wir weisen darauf hin, dass Ihr Hilfsmittel im Zuge des Medizinproduktegesetzes mindestens einmal jährlich von unseren Mitarbeitern überprüft werden sollte. Nur bei regelmäßiger Überprüfung können wir die einwandfreie Funktion gewährleisten.

Bitte vereinbaren Sie daher rechtzeitig einen Kontrolltermin.

- Orthopädietechnik
- Orthopädienschuhtechnik
- Sanitätsfachgeschäfte
- Kinderrehabilitation
- Rehathechnik
- Homecare