



Gebrauchsanweisung für Sonderanfertigungen

Individuelle sensomotorische Einlagen

Die ORTHOVITAL GmbH hat für Sie eine maßgefertigte, orthopädisch-funktionell-aktive Einlage gefertigt. Bei diesem Hilfsmittel handelt es sich um eine Sonderanfertigung, die nur für Ihren persönlichen Bedarf und auf Verordnung Ihres behandelnden Arztes hergestellt wurde. Einlagen sind funktionelle Orthesen zur Vorbeugung und Behandlung von Beschwerden des Muskel-Skelett-Apparates oder bei systemischen Erkrankungen (z. B. Diabetes mellitus). Sie dienen der Korrektur von Gelenken der unteren Extremitäten sowie des Rumpfes, zur Minderung von Haltungsdefiziten des Bewegungsapparates, zur Lastenverteilung und Bettung der Fußweichteile bei vorliegenden Deformitäten. Einlagen sind den Gegebenheiten des Fußes individuell anzupassen und nur zur Verwendung mit gesunder und unverletzter Haut.

Das Produkt wurde mit größter Sorgfalt gefertigt und vor der Abgabe an Sie eingehend geprüft.

Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, so kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren behandelnden Arzt oder den für Sie zuständigen Mitarbeiter der ORTHOVITAL GmbH. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen bzw. Reparaturen an dem Hilfsmittel vor.

Zur Vermeidung von Komplikationen und zum Erhalt der Funktionen lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Hinweise.

Anwendung

- Einlagen nur in dafür geeignetem Schuhwerk tragen.
- Schuhen und Einlagen müssen aufeinander abgestimmt sein.
- Einlagen müssen stets mit Strümpfen getragen werden.
- Bei Problemen mit der Einlage umgehend die ORTHOVITAL GmbH kontaktieren.

Pflege (Reinigung, Desinfektion)

- Zur hygienischen Pflege können die Einlagen in einem Waschbeutel bei 30 °C in der Feinwäsche gewaschen oder mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Die Einlage nicht im Trockner, auf der Heizung oder mit anderen direkten Wärmequellen trocknen. Dies kann zu unerwünschten Materialveränderungen und Passformverlust führen.
- Lederbezogene Einlagen zum Lüften aus dem Schuh nehmen und schonend trocknen.
- Bei starken Verschmutzungen oder Kontakt mit Körpersekreten müssen die Oberflächenbezüge ersetzt werden, da eine ausreichende Desinfektion nicht sichergestellt werden kann.
- Für Medizinprodukte aus Kunststoff nur handelsübliche Flächendesinfektion verwenden.
- Der Kontakt mit Säuren oder Lösungsmitteln muss vermieden werden.
- Sollten sich Veränderungen am Material zeigen, kontaktieren Sie umgehend Ihren Techniker der ORTHOVITAL GmbH.
- Die Einlagen sollten in regelmäßigen Abständen von Ihrem Techniker der ORTHOVITAL GmbH kontrolliert werden, insbesondere bei Kindern im Wachstum oder bei speziellen Indikationen.

Entsorgung

Die Einlagen können gemäß den örtlichen Bestimmungen im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Haftung

Unsere Haftung erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt, in der von uns abgegebenen Ausführung. Bei Veränderungen durch Dritte erlischt der Rechts- und Garantieanspruch.