



Gebrauchsanweisung für Sonderanfertigungen Orthopädische Maßschuhe, Schuhzurichtung, Diabetesadaptierte Fußbettung, Therapieschuhe

Sie haben von der ORTHOVITAL GmbH ein für Sie individuell hergestelltes orthopädiesschuhtechnisches Hilfsmittel erhalten. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen und Sicherheitshinweise.

Tragezeiten

Halten Sie bitte folgende Tragezeiten beim Erstgebrauch ein:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tag vormittags: 15 Minuten | 1. Tag nachmittags: 30 Minuten |
| 2. Tag vormittags: 60 Minuten | 2. Tag nachmittags: 90 Minuten |
| 3. Tag vormittags: 180 Minuten | |

Führen Sie nach jedem Trageintervall eine Sichtkontrolle beider Füße durch.

Ab dem 3. Tag mittags ist die Tragezeit unbegrenzt bei regelmäßiger abendlicher Sichtkontrolle beider Füße, wenn erforderlich unter Zuhilfenahme eines Spiegels für die Fußsohle und die Ferse.

Beginnt die Ersttragezeit am Nachmittag, verschieben sich die Tragezeiten entsprechend.

Sollten Hautrötungen oder Reizungen auftreten, setzen Sie sich bitte unmittelbar mit uns oder Ihrem Arzt in Verbindung.

Pflegehinweise

Bei Durchfeuchtung des Hilfsmittels trocknen Sie es langsam und nicht auf Heizung oder Ofen. Achten Sie auf scharfe Kanten und Druckstellen, die durch das Trocknen entstehen können. Benutzen Sie keine scharfen oder ätzenden Flüssigkeiten zum Reinigen des Hilfsmittels. Pflegen Sie das Oberleder mit hochwertigen Schuhpflegemitteln, damit es weich und geschmeidig bleibt.

Wartungsintervalle

Gehen Sie bitte im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit regelmäßig alle 3 – 4 Monate zur Kontrolle des Hilfsmittels. Bei Nichteinhaltung der Wartungstermine oder Veränderungen am Produkt durch Dritte ist die Haftung in Schadensfällen eingeschränkt oder erlischt völlig.

- Orthopädietechnik
- Orthopädiesschuhtechnik
- Sanitätsfachgeschäfte
- Kinderrehabilitation
- Rehatechnik
- Homecare